

JOYSBIO COVID-19 ANTIGEN SPUCKTEST

SPEICHEL STATT STÄBCHEN: KEIN NASENABSTRICH NOTWENDIG

Produktbezeichnung

Joysbio COVID-19 Antigen Spucktest

Einheit

20 oder 5 oder 1 Test/ Packung

Art.-Nr.

10007

Lagertemperatur

2-30°C

Test Ort

Point of care (ohne Gerät)

Test Type

Qualitativ

EIGENSCHAFTEN

Probenart: Speichel

Sensitivität: 95,10%

Spezifität: 100 %

Auslesezeit: 15-20 Minuten





TESTVERFAHREN

SCHRITT 1	Spucken Sie genügend Speichel in den Sammelbeutel.
SCHRITT 2	Schrauben Sie die Puffer lasche ab und drücken Sie den gesamten Puffer in das Extraktionsröhrchen.
SCHRITT 3	Übertragen Sie 3 Tropfen Speichel mit der Tropfpipette in das Extraktionsröhrchen.
SCHRITT 4	Schütteln Sie das Extraktionsröhrchen leicht, damit sich der Speichel gut mit dem Extraktionspuffer vermischt.
SCHRITT 5	Übertragen Sie 3 Tropfen der verarbeiteten Probe vertikal in die Probenvertiefung.

Lesen Sie das Ergebnis zwischen 15 bis 20 Minuten ab.

SCHRITT 6



VORTEILE

Spucktest, kein Nasenabstrich nötig
Liefert hochpräzise Ergebnisse in ca. 15 Minuten
Einfache Handhabung

Testmöglichkeit dort, wo keine Labortests zur Verfügung stehen

Jeder Test in steriler Einzelverpackung

Haltbarkeit: 24 Monate (siehe Verpackungsaufdruck)

LIEFERUMFANG

- 20 Testkarte
- 20 Trockenmittel
- 40 Pufferflasche (350µL/Flasche)
- 20 Extraktionsröhrchen jeweils mit 1x Düsenkappe
- 20 Probensammelbeutel
- 20 | Einweg-Tropfer
 - 1 Gebrauchsanweisung

	TESTERGEBNIS C POSITIV		
			Zwei Linien sind vorhanden. Eine farbige Linie sollte sich im Bereich der Kontrolllinie (C) befinden. Eine farbige Linie erscheint im Bereich der Testlinie (T).
	C	NEGATIVE	Nur eine farbige Kontrolllinie ist vorhanden. Negative Ergebnisse sind präsumptiv.
	C C T	UNGÜLTIG	Die Kontrolllinie erscheint nicht.

KLINISCHE BEWERTUNG

DE ACENZTECTED CEDNICCE	PCR KOMPARATOR		714/1001151101114145
REAGENZTESTERGEBNISSE	POSITIVE	NEGATIVE	ZWISCHENSUMME
POSITIVE	97	0	97
NEGATIVE	5	260	265
ZWISCHENSUMME	102	260	362
SENSITIVITÄT	95,10%		
SPEZIFITÄT		100%	