


WICHTIG: Lesen Sie das U-Card Dx Benutzerhandbuch und die U-Card Dx Gebrauchsanweisung für vollständige Informationen


A. GERÄT VORBEREITEN

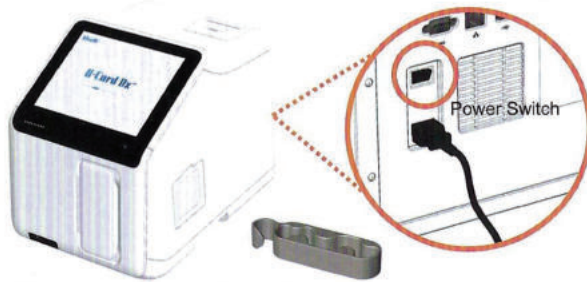

- Legen Sie das Gerät auf eine flache Oberfläche.
- Nehmen Sie das Netzkabel und verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose.
- Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts ein.
- Legen Sie den Kartuschenhalter in die Nähe des Geräts.

HINWEIS: Melden Sie sich nach dem einschalten mit Ihren Benutzerdaten an.

HINWEIS: Die Lagerungsbedingungen für unbenutzte Proben sind in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

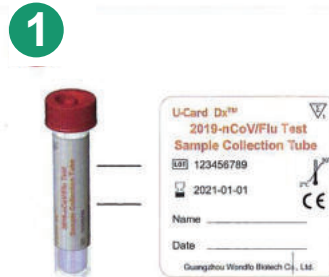

- Das Label des Proberöhrchens mit den Patienteninformationen beschriften.
 - Alternativ können Sie auch einen Barcode mit der Patienten-ID anbringen und mit dem Gerät einscannen.
 - Nasopharyngealen Abstrich entnehmen. (Probe gemäß der Gebrauchsanweisung mit dem enthaltenen Tupfer entnehmen).




- Kappe am Entnahmeröhrchen entfernen.
 - Tupferprobe in den Puffer einlegen.
 - Tupfer an der Sollbruchstelle brechen und die Tupferspitze im Entnahmeröhrchen belassen.
 - Das Röhrchen verschließen.
 - Röhrchen auf den Kopf stellen 5-mal umdrehen.



- Einwegpipette
 - Setzen Sie das Entnahmeröhrchen und die Kartusche in den Kartuschenhalter.
 - Halten Sie eine Einwegpipette (0,2 mL) bereit.
- HINWEIS:** Die Kartusche sollte in der in der Abbildung gezeigten Ausrichtung in der Kartuschenhalterung gesteckt werden, um Verschütten zu verhindern.

C. TESTVERFAHREN


HINWEIS: Die aus ihrer Aluminiumfolienverpackung entnommene Kartusche muss innerhalb von 1 Stunde verwendet werden.

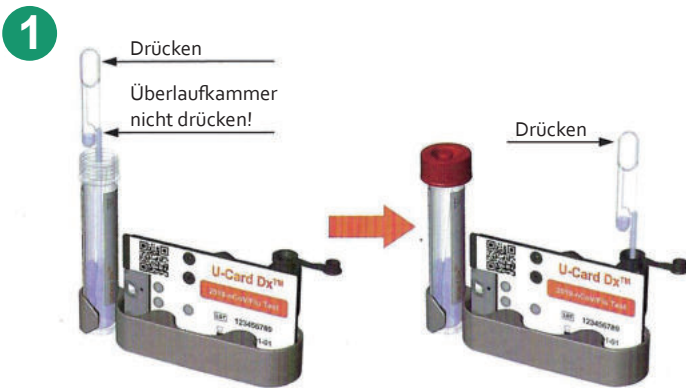

- Entfernen Sie die Kappe des Sammelröhrchens.
 - Füllen Sie die Einwegpipette, indem Sie den oberen Kolben fest zusammendrücken und die Pipettenspitze in die Probe stecken. Den Kolben langsam loslassen, während sich die Spitze noch in der Probe befindet. Dadurch wird Flüssigkeit in die Pipette gesaugt. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen in der Pipettenspitze befinden.
 - Entleeren Sie die Probe in die Kartusche, indem Sie den oberen Luftkammer fest zusammendrücken und die Pipettenspitze **GANZ** in die Probenladekammer der Kartusche stecken.
 - Entsorgen Sie die Pipette in einem Behälter für biologische Abfälle.
 - Verschließen Sie das Sammelröhrchen wieder.



- Verschließen Sie den Deckel der Kartusche fest.

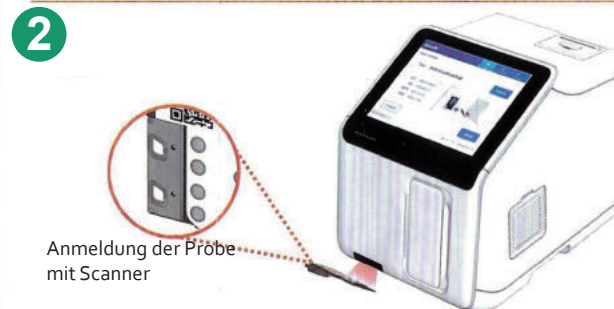

- Scannen Sie den Barcode auf der Kartusche mit dem Gerät, wenn Sie dazu aufgefordert werden, bis ein "Piepton" ertönt.
- HINWEIS:** Drehen Sie die Kassette nach dem Laden der Probe **NICHT** um. Achten Sie darauf, dass die Kappe immer nach oben zeigt. Vermeiden Sie es, die Erkennungsfenster auf der Kartusche zu berühren.



- Öffnen Sie die Tür des Geräts.
 - Setzen Sie die Kassette mit der Etikettenseite nach LINKS in den Schlitz des Geräts ein. Vergewissern Sie sich, dass die Karte **VOLLSTÄNDIG** in den Schlitz eingeführt ist.
 - Schließen Sie die Klappe und wählen Sie "START" auf dem Touchscreen.
 - **ERGEBNISSE WERDEN AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT.**
 - Entsorgen Sie die Kartusche nach dem Test in einem Behälter für biologische Abfälle.
- HINWEIS:** Der Benutzer kann auch den Anweisungen für das Testverfahren auf dem Touchscreen folgen. Öffnen Sie die Tür **NICHT** und ziehen Sie die Kartusche nicht während der Test läuft.